

HOGGI[®]



ZIP Revalidatie kinderbuggy

Gebruiksaanwijzing (NL)

HOGGI[®] - *Partner in mobiliteit*

Gebruiksaanwijzing van ZIP

Inhoudsopgave	Pagina
1 Algemene informatie	
1.1 Voorwoord	2
1.2 Toepassing	2
1.3 Conformiteitsattest	2
1.4 Garantievoorwaarden	2
1.5 Naverkoopdienst en herstellingen	2
2 Veiligheidsvoorschriften	3
2.1 Verklaring van de symbolen	3
2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften	3
3 Levering en voorbereiden voor gebruik	6
4 Afstellingen en aanpassingsmogelijkheden	8
4.1 Remmen	8
4.2 Hoekinstelling rug	8
4.3 Hoogte voetsteun	8
4.4 Hoekinstelling voetsteun	10
4.5 Diepte zitting	10
4.6 Demonteren van de wielen	10
4.7 Luchtbanden	10
5 Accessoires	11
5.1 Zwenkvergrendeling	11
5.2 Rijrem	11
5.3 Veiligheidsbevestigingspunten voor het transport	12
5.4 Rugkussen	12
5.5 Zitkussen	12
5.6 Gecompartimenteerd zitkussen	12
5.7 Buikgordel	13
5.8 Vijfpuntengordel	13
5.9 Voetbandjes	15
5.10 Beschermingsstang met bekleding	15
5.11 Therapeutische tafel	15
5.12 Wintervoetenzak	15
5.13 Regenhoes	16
5.14 Kap met regenhoes	16
5.15 Buggy-Board (voetstuk)	17
5.16 Parasol	17
5.17 Transporttas	17
6 Transport	17
6.1 In de kofferbak van een auto	17
6.2 Transport van de buggy in een aangepast voertuig	18
7 Onderhoud	18
8 Technische gegevens	19

1 Algemene informatie

1.1 Voorwoord

Wij bedanken u voor uw aankoop van een ZIP buggy, een kwaliteitsproduct van onze firma.

Deze gebruiksaanwijzing werd opgesteld om u te helpen vertrouwd te raken met het gebruik en het onderhoud van uw kinderwagen.

Lees alstublieft aandachtig de volgende instructies om een verkeerd gebruik van de buggy en zo een beschadiging ervan te vermijden. Indien u nog vragen of problemen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.

Wij wensen u een goed gebruik van uw ZIP en hopen dat hij aan uw verwachtingen zal voldoen. Wij houden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen aan deze gebruiksaanwijzing.

1.2 Toepassing

De kinderwagen wordt aanbevolen als hulpmiddel voor het verplaatsen van gehandicapte kinderen, die niet kunnen lopen of die geen rolstoel kunnen gebruiken.

Deze hulp kan noodzakelijk zijn als gevolg van:

- asymmetrische spier bewegingen (spastisch);
- verlies van ledematen;
- samengestelde instabiliteit;
- samengestelde contracties;
- samengestelde mankementen;
- algemene zwakheid.

1.3 Conformiteitsattest

HOGGI® GmbH als fabrikant met de algehele aansprakelijkheid verklaart dat de ZIP kinderwagen voldoet aan de eisen van de richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

1.4 Garantievoorwaarden

De garantie is uitsluitend van toepassing indien het product wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen.

1.5 Naverkoopdienst en herstellingen

Het onderhoud en de herstellingen van de ZIP dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door erkende HOGGI dealers. Richt u tot uw plaatselijke dealer, hij zal u de originele onderdelen bezorgen.



Voor onderhoud en herstellingen is het volgende gereedschap noodzakelijk:
inbussleutel, maat, 4 mm, 5 mm en 6 mm;
Platte sleutel, maat 10 mm, 13 mm en 19 mm.

Uw erkende HOGGI dealer:

2 Veiligheidsvoorschriften

2.1 Verklaring van de symbolen



Opgelet!
Waarschuwing voor mogelijk gevaar voor een ongeluk of verwondingen.
Waarschuwing voor mogelijke technische schade.



Informatie!
over het gebruik van het product.



Informatie!
voor de technische dienst.



Opgelet!
Lees het handboek vóór gebruik!

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



Lees vóór gebruik het handboek helemaal door!
Maak u zelf vertrouwd met de bediening en werking van de buggy voordat u hem gebruikt. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. De veiligheid van uw kind kan in gevaar komen als u zich niet houdt aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het is echter onmogelijk alle mogelijke omstandigheden en onvoorspelbare situaties te omschrijven. Wees voorzichtig en redelijk wanneer u dit product gebruikt. De persoon die het gebruikt moet in staat zijn deze instructies te begrijpen. Iedereen die de buggy gebruikt moet de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. Indien u een verdere uitleg wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met uw HOGGI dealer.



Maak uw kind in de buggy altijd vast met behulp van de veiligheidsgordels.



HOGGI wijst erop dat ieder gebruik anders dan bedoeld tot gevaarlijke situaties kan leiden. De kinderwagen is niet geschikt om mee te joggen, rennen, skaten of andere vergelijkbare activiteiten uit te voeren. De zwenkwieltjes vooraan neigen tot wiebelen bij een hoge snelheid, waardoor de kinderwagen plotseling tot stilstand kan komen en kan kantelen. Gebruik de buggy slechts in een normaal looptempo. Laat de buggy tijdens het duwen nooit los en duw hem nooit ver weg.



De buggy dient uitsluitend te worden gebruikt op een platte en stabiele ondergrond.



Gebruik uw kinderwagen uitsluitend waarvoor deze door de fabrikant is ontworpen. Vermijd bijvoorbeeld tegen stoepanden aan te rijden.



Om obstakels zoals trappen en stoepanden te overwinnen, kantelt u de buggy op de achterwielen (trek achterover om op de verhoging te komen; om weer neer te komen laat u de duwwandelwagen langzaam voorover zakken)..



Rijd niet op trappen zonder de hulp van een begeleider. Indien opritten of liften beschikbaar zijn, verzoeken wij u daar gebruik van te maken. Indien dergelijke voorzieningen niet aanwezig zijn, dient de buggy door twee personen over het obstakel te worden getild.



Wees uiterst voorzichtig op hellingen om te voorkomen dat:
-het kind uit de buggy valt;
-de buggy kantelt;
-de buggy ongewild weg rolt.



Breng de kinderwagen slechts tot stilstand op vlakke en horizontale oppervlakten. Indien u op een helling moet stoppen, zorg dan dat de zitting zich horizontaal bevindt en de buggy in evenwicht is. Wanneer de zitting overheelt bestaat het risico dat de buggy achterover kantelt.



Voor u het kind in de buggy plaatst of eruitneemt dient u de voorwielen te vergrendelen.



Ga niet op de voetsteun staan wanneer u het kind in de buggy plaatst of eruitneemt.



Til de buggy alleen op aan onderdelen die goed zijn bevestigd:
- de voorste framebuis boven de voorwielen;
- duwgrepen / duwhendel.



Waak erover dat het kind niet te ver uit de buggy leunt (naar voor, zijdelings of naar achter) omdat het verplaatsen van het zwaartepunt de buggy kan doen kantelen of omkiepen.



De juiste bandendruk is zeer belangrijk! Voldoende opgepompte banden verbeteren de mogelijkheid tot manoeuvreren aanzienlijk. De druk dient ten minste 2 bar te bedragen.



Vóór ieder gebruik moet u nagaan of de buggy in goede staat is.



Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Plastic verpakkingen kunnen verstikking veroorzaken.



Laat uw kind nooit zonder toezicht in de buggy, zelfs niet als de veiligheidsgordels zijn vast gemaakt en de remmen zijn vastgezet.



Voordat u het kind in de buggy plaatst dienen beide vouwmechanieken en de zitting goed op hun plaats te zijn vergrendeld.



Statische stabiliteit bij $>15^\circ$.
Het hangen van zware tassen of andere zaken aan de duwgrepen kan de stabiliteit negatief beïnvloeden.



De therapeutische tafel mag niet worden belast met meer dan 5 kg.



In de buggy mag slechts één kind tegelijk vervoerd worden.



Het maximale gewicht voor de ZIPframe is 50 kg



Accessoires en uitbreidingen verminderen het maximale gewicht dienovereenkomstig.

Opgelet!

Bij het vervoeren van gehandicapte personen in een aangepast voertuig is het aanbevolen deze personen in de zetels van dit voertuig uitgerust met veiligheidsgordels te plaatsen. Op die manier zijn de passagiers optimaal beveiligd bij ongeval.



Uw ZIPbuggy heeft met succes de crashtests doorstaan volgens de Amerikaanse norm ANSI/RESNA WC/19 en de internationale norm ISO 7176/19.

Met gebruik van het accessoire (bevestigingspunten, artikel 3210-7300) en de gepaste veiligheidsgordels, kan de ZIPbuggy als zitplaats dienen in een voertuig aangepast voor het transport van gehandicapte personen.



Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.

3 Levering en voorbereiden voor gebruik



De originele verpakking omvat de volgende onderdelen:

- de opgevouwen buggy
- instructies voor gebruik en lijst met noodzakelijke gereedschappen;
- accessoires die u heeft besteld.

Verwijder voorzichtig de verpakking en de onderdelen aangebracht voor de veiligheid tijdens het transport.



Om de buggy uit te vouwen gaat u als volgt te werk:

- Til de buggy op met behulp van de zwarte handgrepen en ontvouw deze totdat u hem op de wielen neer kunt zetten.



Opgelet!

Er is een risico dat uw vingers vastgeklemd worden : houdt de buggy niet vast aan een ander onderdeel dan de handgrepen en vooral niet aan de gekruiste dwarsstang.



- Duw de handgrepen naar achteren totdat de vouwvergrendeling vast zit.




- Controleer beide vouwvergrendelingen.

-
- Duw de vergrendeling van de rugleuning naar beneden.



- Doe de voetsteun naar voren zakken.
- Trek de vergrendelriem naar voor tot de pinnetjes naar de binnenkant uitgetrokken zijn.

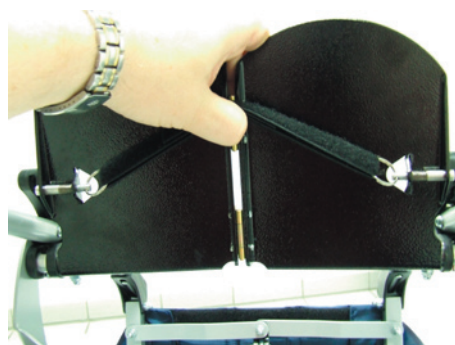

- Plaats de voetsteun in de gewenste hoek en laat de pinnetjes zich in een van de gaatjes koppelen.



Om de buggy op te vouwen gaat u omgekeerd te werk.



4 Afstellingen en aanpassingsmogelijkheden



4.1 Parkeerrem

Om de parkeerrem te vergrendelen duwt u met de punt van de voet de hendel van de parkeerrem naar beneden en rolt u de buggy iets naar voren of naar achteren zodat de vergrendelpinnen in de remschijf kunnen vallen.

Vergrendel altijd de twee remmen.



Om de parkeerrem te ontgrendelen trekt u de hendel van de parkeerrem met uw voet omhoog.



4.2 Hoekinstelling rug

Draai de klemknoppen aan beide zijden een weinig los en zet de rugleuning schuin.



Draai vervolgens de knoppen weer goed vast.




Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.



4.3 Hoogte voetsteun

Draai de 2 inbusvijzen aan elk kant los. Regel de hoogte van de voetsteun, zorg dat hij symmetrisch is en draai de vijzen weer vast.

Naargelang de gewenste hoogte is het soms nodig eerst vijs (A) uit te vijzen en

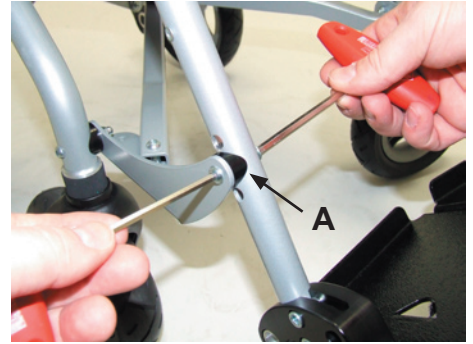


....de voetsteunhouder vóór het vijsgat te plaatsen. Steek vervolgens de vijs (A) terug.



Indien, bij het regelen van de hoogte, de voetsteunhouder zich juist op het gat van vijs (A) bevindt, is het mogelijk hem te demonteren en te draaien.



Hiervoor dient u de voetsteunhouder van het frame te halen en de linker- en rechterhouder om te wisselen.

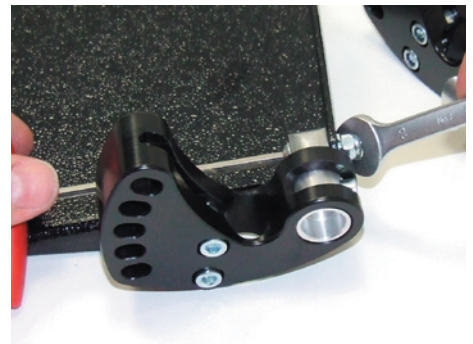

Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.

De minimumhoogte van 20 cm is slechts mogelijk wanneer de voetsteun zich zoals op de foto bevindt. De hoogte is beperkt door een pal.





De maximumhoogte van 39 cm is slechts mogelijk wanneer de voetsteun zich zoals op de foto bevindt.



De maximumhoogte van 39 cm is bereikt wanneer de voetsteunhouder de onderste boord van het frame raakt.



4.4 Hoekinstelling voetsteun

- Trek de vergrendelriem naar voren zodat de grendels naar de binnenkant staan.
- Plaats de voetsteun in de gewenste stand en steek de grendel in de gekozen sleuf.
- Aangezien de voetsteun omgedraaid kan worden zijn er sleuven aan beide zijden.



4.5 Diepte zitting

U dient alle vijzen die de zitting vasthouden uit te halen ; u hebt de keuze uit twee dieptes.

ZIP T1 : 30 of 35 cm



Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.



4.6 Demonteren van de wielen

De achterwielen zijn demonteerbaar ; zo neemt de opgeplooidde buggy nog minder plaats in.

Duw op de vergrendeling en trek zijdelings aan het wiel.

Om het wiel terug te plaatsen dient u het op de as te duwen totdat het wiel automatisch vastklikt op de as. Controleer of het wiel goed vast zit door eraan te trekken.



4.7 Luchtbanden (optioneel)

Alle wielen kunnen uitgerust worden met luchtbanden.

De ventielen zijn dezelfde als bij een wagen en de druk kan gecontroleerd worden in een tankstation.

Let daarbij op de maximale druk aangegeven op de zijkant van de band.

5 Accessoires

Alle accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd dienen te worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd technicus. De volgende uitleg is voor die personen bestemd.

Alle accessoires aangestipt met een (*) moeten verwijderd worden vóór u de buggy opplooit.



De fixeeriemen zijn meestal te lang, dit om aan elk gebruik te kunnen voldoen. Bij het opplooiën kunnen de uiteinden van de fixeeriemen gekneld raken. Kort dus de uitstekende einden in om dit te vermijden. Om het rafelen van de ingekorte fixeeriemen te voorkomen kunnen de einden bij elkaar gesmolten worden d.m.v. een vlammetje.

5.1 Zwenkvergrendeling

De zwenkvergrendeling wordt door de fabrikant of door een erkend dealer gemonteerd.

Om het wiel vast te zetten draait u de vergrendelpin met 90° en zet u hem weer vast in het daarvoor bestemde gaatje in de zwenkvork.

Om de zwenkvergrendeling te openen trekt u aan de vergrendelpin, draait u deze met 90° zodat hij weer in de onvergrendelde positie uitkomt.

Het is mogelijk het wiel te blokkeren door de vijs aan de zijkant vast te zetten.



5.2 Rijrem

De ZIP kan uitgerust worden met rijremmen. De remmen worden in werking gesteld met een remhendel op elke handgreep.



Deze remmen mogen enkel gebruikt worden tijdens het rijden. Gebruik bij stilstand enkel de parkeerremmen.



Bijstellen:

De remmen worden ingesteld door de fabrikant. Indien het nodig is ze bij te stellen, ga dan als volgt te werk :

Draai de conramoer aan de handgreep los. Regel de spanning van de kabel met de regelingsvijs.

Draai de conramoer opnieuw vast.

Let erop dat de kabelgids naar binnen gedraaid is, anders zou hij tegen het wiel kunnen wrijven.





5.3 Veiligheidsbevestigingspunten voor het transport

De ZIP is geslaagd in de crashtest. Met gebruik van het accessoire 3210-7300 en de gepaste fixeerrimen, kan de ZIPbuggy gebruikt worden om personen te vervoeren in een aangepast voertuig.

Tijdens het transport moeten de riemen vastgemaakt worden aan het voertuig en aan de bevestigingspunten van de buggy.



5.4 Rugkussen

De ZIP kan uitgerust worden met een rug- en een zitkussen.

In de twee kussens bevinden er zich openingen om de vijfpuntengordel door te laten.




Plaats het kussen tegen de rugleuning en maak het vast met met de velcro boven- en onderaan de rugleuning.



5.5 Zitkussen

Het zitkussen wordt eveneens met velcro vastgemaakt aan de zitting.

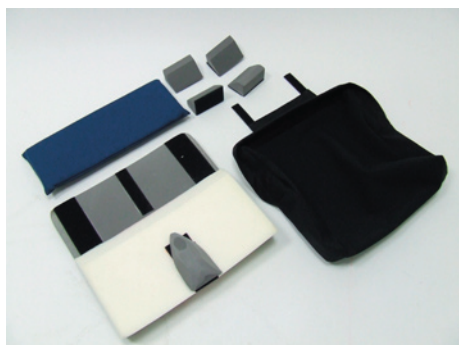

5.6 Gecompartimenteerd zitkussen (*)

Dit kussen is samengesteld uit een overtrek en verschillende stukken schuim.

Er bestaan 3 verschillende kussens voor de zitting.

Met de geleverde onderdelen is het mogelijk een adductie of een abductie te plaatsen.

Dit kussen wordt aan de zitting vastgemaakt met velcro.

Het moet weggenomen worden vóór u de buggy opplooit.

Dit kussen kan niet gebruikt worden samen met een vijfpuntengordel.



5.7 Buikgordel

Aan beide kanten van de gordel is een gesp gemonteerd. Steek de gordel in de gesp zoals op de foto zodat hij slechts één maal in de gesp passeert. De resterende lengte bepaalt de eindlengte van de gordel.

Steek de gordel in de hiervoor bedoelde gleuf aan beide kanten van het buggykader.



Steek nu de gordel opnieuw in de gesp.



Open de buikgordel door op de rode knop te drukken.

De lengte van de gordel kan aangepast worden door aan de riem te trekken juist naast de sluiting.



5.8 Vijfpuntengordel

Vorbereiding/montage:

Op de rugleuning zijn banden stof genaaid die op verschillende hoogtes fixeerpunten vertonen. Maak de ring aan het uiteinde van de gordel vast aan één van die fixeerpunten.





Doe hetzelfde met de gordel die aan de zitting moet vastgemaakt worden.

Plaats de gordel zodanig dat hij zo dicht mogelijk bij het lichaam komt. Hij mag zich echter niet onder het kind bevinden.



Nu dient u het rug- en zitkussen terug te plaatsen, maak ze vast met de velcro.

De centrale gordels worden geplaatst zoals beschreven onder punt 5.7 buikgordel.



Om de vijfpuntengordel af te doen, handelt u als volgt:

- Druk op de rode knop van de sluiting.
- Druk op de knop van het verstelsysteem van de gordel en trek eraan tot er nog slechts 5 cm gordel overblijft.
- Op die manier bekomt u een zeer wijde gordel die u toelaat gemakkelijk de armen van het kind vrij te maken.



- Til het kind uit de buggy.



Om de vijfpuntengordel vast te maken, handelt u als volgt:

- Plaats het kind in de buggy.
- Steek eerst een elleboog van het kind door één van de schouderlussen van de gordel en daarna de arm en het hand.
- Doe hetzelfde met de andere arm.



- Plaats de uiteinden van de gordel in de sluiting.
- Span de schouder- en buikgordel aan door aan de uiteinden van de riemen te trekken die uit de lengteversteller komen.

5.9 Voetbandjes

Leid de voetbandjes door de ringen op de voetsteun en kruis ze over de voet van het kind. De hiel dient tegen de hielplaat van de voetsteun te rusten. Plaats de sluiting altijd aan de buitenkant.

Sluiten en aanspannen gebeurt met de velcro.



5.10 Beschermingsstang met bekleding (*)

Plaats de stang in de opening aan het uiteinde van de zitting. Hou de drukknop (langs beide zijden) ingedrukt.

De stang is gebogen en kan dus in de twee richtingen geplaatst worden.



Om te openen duwt u op de drukknop (aan elke zijde) en trekt u de stang volledig eruit.

U kunt de bekleding gemakkelijk verwijderen door de rits te openen.



5.11 Therapeutische tafel (*)

De tafel wordt geplaatst en weggenomen op dezelfde wijze als de stang.

Ze is in de diepte en schuin verstelbaar door middel van de klemhendels.

Respecteer de maximale belasting van de tafel.



Maximumgewicht op de tafel: 5 kg.



5.12 Wintervoetenzak (*)

Ritsen zorgen ervoor dat de bovenkant van de voetenzak kan worden geopend of verwijderd.

Plaats de voetenzak op de buggy en maak hem vast met de strips.





Om te vermijden dat de zak van de buggy afglijdt, dient u de strips achter de zak om aan het frame vast te knopen.

Haal de voetenzak van de buggy vóór u deze opplooit.



5.13 Regenhoes (*)

Trek de kap over het hoofd van het kind en vouw dan de bovenkant over de rugleuning en de onderkant rond de voetsteun.



5.14 Kap met regenhoes

Montage bij de levering:

- Indien dit niet gebeurde door de fabrikant, monteert de dealer het adaptatiestuk op het frame.
- Plaats de twee stangen van de kap aan beide zijden in de adaptatiestukken.
- De instellingshoek van de kap kan versteld worden.
- Spreid de kap uit en vouw de achterkant over de rugleuning.



Kap met regenhoes:

Plaats de regenhoes op de kap en trek haar over de voetensteun.



U moet de kap niet afnemen om de buggy op te plooiën.

Trek de kap naar voor zoals op de foto.

Plooi daarna de buggy zoals beschreven in punt 3.



5.15 Buggy-Board (voetstuk) (*)

De ZIP kan uitgerust worden met een buggy-board om een tweede kind gemakkelijk te vervoeren.

Het adaptatiestuk moet boven de as van de achterwielen geplaatst worden.



5.16 Parasol (*)

De ZIP kan uitgerust worden met een parasol.

Het adaptatiestuk wordt op één van de handgrepen van de ZIP vastgemaakt.

De parasol wordt op dit stuk gefixeerd. De ZIP kan opgeplooid worden met dit adaptatiestuk.



5.17 Transporttas

De transporttas dient om de buggy te beschermen en hem opgeplooid gemakkelijker mee te nemen.



6 Transport

6.1 In de kofferbak van een auto

U kunt de opgeplooide buggy in de koffer van om het even elke auto plaatsen.

Maak hem vast om te vermijden dat hij in de koffer verschuift.



6.2 Transport van de buggy in een aangepast voertuig



Opgelet!

Bij het vervoeren van gehandicapte personen in een aangepast voertuig is het aanbevolen deze personen in de zetels van dit voertuig uitgerust met veiligheidsgordels te plaatsen. Op die manier zijn de passagiers optimaal beveiligd bij ongeval.

Uw ZIPbuggy heeft met succes de crashtests doorstaan volgens de Amerikaanse norm ANSI/RESNA WC/19 en de internationale norm ISO 7176/19.

Met gebruik van het accessoire (bevestigingspunten, artikel 3210-7300) en de gepaste veiligheidsgordels, kan de ZIPbuggy als zitplaats dienen in een voertuig aangepast voor het transport van gehandicapte personen.

7 Onderhoud

Uw ZIP buggy is EG goedgekeurd. Dit betekent dat de fabrikant garandeert dat dit product in zijn geheel voldoet aan de richtlijnen van de norm EG 93/42/t.

Vóór ieder gebruik moet de goede werking van het product nagekeken worden.

De onderdelen in de volgende tabel dienen door de gebruiker met de aangegeven intervallen te worden gecontroleerd.

Controleer	dagelijks	wekelijks	maandelijks
De werking van de rem / de parkeerrem	X		
De schroefverbindingen		X	
Druk van de banden (indicatie op de zijkant van de band)		X	
Visuele controle van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals wielen en lagers			X
Properheid van lagers			X

Indien er gebreken aan het licht komen verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkende HOGGI dealer om er een oplossing voor te vinden.



Schoonmaak

- Maak het frame en alle plastic onderdelen uitsluitend schoon met een mild reinigingsmiddel
- De bekleding kan worden gewassen op 40°. In de wasmachine dient u ze in een linnen zak of in een kussensloop te doen.
- In de meeste gevallen is schoonmaken met een vochtige doek voldoende.
- Gebruik uw ZIPbuggy niet in zeewater.
- Vermijd dat zand in contact komt met de verschillende onderdelen van de buggy.

8 Technische gegevens

Afmetingen (cm) gewicht (kg)	Maat 1
Diepte zitting	30 cm / 35 cm
Breedte zitting	35 cm
Lengte standaardrugleuning	60 cm
Lengte hoge rugleuning	66 cm
Onderbeenlengte	20 - 39 cm
Hoekinstelling zitting	18°
Hoekinstelling rug	90°-100° (optioneel 105°)
Hoekinstelling voetsteun	-10°/0°/+10°
Hoogte van de handgreep	112 cm
Totale breedte	59 cm
Wieldiameter (achter – voor)	20 cm / 30 cm
Afmetingen opgevouwen (L x l x h)	78 cm x 36 cm x 39 cm
Gewicht	12,5 kg
Maximale belasting	50 kg
Draaicirkel	126 cm



Opgelet!
Accessoires en uitbreidingen verminderen het maximaal toegestane gewicht van de passagier evenredig.

Fabrikant:

Hoggi GmbH

Taunusstrasse 17

56235 Ransbach-Baumbach

DUITSLAND

Fon: (+49) 26 23 / 92 499-0 · Fax: (+49) 26 23 / 92 499-99

e-mail: info@hoggi.de · Internet: <http://www.hoggi.de>